

Anigen Rapid

FIV Ab/FeLV Ag

Información General

Objetivo: Detección simultánea del anticuerpo del Sida Felino y del Antígeno de la Leucemia Felina

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Sangre completa, plasma o suero

Materiales:

- Dispositivos para prueba rápida Anigen FIV Ab / FeLV Ag
- Tubos con anticoagulante
- Tubos de ensayo con diluyente
- Tubos capilares desechables


Características especiales:

- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: FIV Ab 96.8 % vs. Western Blot, FeLV Ag 94.7 % vs. Aislamiento de virus
- Especificidad: FIV Ab 99.6 % vs. Western Blot, FeLV Ag 99.7 % vs. Aislamiento de virus



- ◆ **FIV Ab**
Un gato en la fase aguda de la infección puede ser negativo al FIV Ab, por lo que volver a correr la prueba a las 6-8 semanas garantiza un diagnóstico en gatos cuyo historial reciente los pone en riesgo de exposición.
- ◆ **FeLV Ag**
Para eliminar completamente el riesgo de introducción de un gato enfermo a una casa, se debe correr una segunda prueba a los 90 días de la primera prueba o de la posible exposición a virus, ya que los gatos pueden encontrarse en las primeras fases de la infección al momento de llevar a cabo la primera prueba.
- ◆ **Gatitos**
Los resultados de FIV Ab deben ser interpretados cuidadosamente en gatos de menos de 6 meses de edad. Los gatitos de menos de 12 semanas de edad pudieran haber adquirido inmunidad pasiva a través de las madres infectadas o bien vacunadas. Si se observan resultados positivos en los gatos pequeños debe correrse una segunda prueba después de las 8-12 semanas. Si el gatito está negativo lo más probable es que no tenga la enfermedad, si aparece positivo es muy probable que la haya adquirido. La prueba del FeLV Ag puede llevarse a cabo a cualquier edad. Si la madre es positiva al FeLV Ag, los gatitos serán muy probablemente positivos al nacer.

Procedimiento

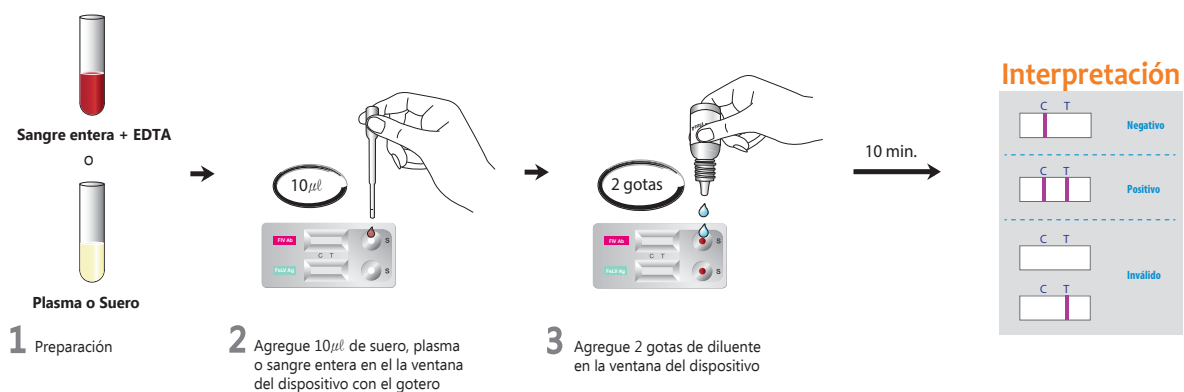

Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RC1204DD	FIV Ab/FeLV Ag	Dispositivo dual	10 Pruebas/Kit