

Anigen Rapid CPV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del Parvovirus canino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Heces caninas

Materiales:

- Dispositivos para prueba rápida Anigen CPV Ag
- Tubos con diluyente para muestras
- Hisopos para muestra
- Goteros desechables

Características especiales:

- Detección de subtipos patógenos de CPV (CPV 2, 2a, 2b y 2C)
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
- Sensibilidad: 100% vs. PCR
- Especificidad: 98.5% vs. PCR



Procedimiento

- 1 Recolecte las heces caninas usando el hisopo
- 2 Inserte la muestra en el tubo del diluyente y agite el hisopo por lo menos 10 veces
- 3 Retire el hisopo exprimiéndolo contra las paredes del tubo
- 4 Tome el sobrenadante con el gotero desechable
- 5 Agregue 4 gotas en la ventana del dispositivo de la prueba

Interpretación

C	T	Negativo
C	T	Positivo
C	T	Inválido

Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1101DD	CPV Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit

