

## Anigen Rapid

# Lyme Ab

### Información General

**Objetivo:** Detección de anticuerpos de *Borrelia burgdorferi*

**Principio:** Ensayo de Inmunocromatografía

**Muestra:** Sangre completa, plasma o suero

**Materiales:**

- Dispositivo Anigen Prueba Rápida Borrelia
- Diluyente Buffer para la prueba
- Tubo con Anticoagulante
- Tubo capilar desechable

**Características especiales:**

- Procedimiento de un solo paso : Rápido y Preciso
- Alta sensibilidad y especificidad



### Procedimiento

**1** Coloque la muestra de sangre en el tubo EDTA

**2** Tape el tubo con EDTA e invértalo 5 veces para mezclar la sangre y el EDTA

**3** Agregue 10µl de suero, plasma o sangre entera en el la ventana del dispositivo con el gotero

**4** Agregue 3 gotas de diluyente en la ventana del dispositivo

**Interpretación**

C	T	Negativo
C	T	Positivo
C	T	Inválido

### Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RB2122DD	Lyme Ab	Dispositivo	10 Pruebas/Kit