

# Vcheck Ag

## Prueba de Antígeno

### Prueba de Antígeno

Las enfermedades infecciosas caninas y felinas se pueden diagnosticar de forma rápida y precisa.

#### Especificaciones

- Lea los resultados en 10 minutos.
- La lectura visual de los resultados de las pruebas rápidas puede llevar a una interpretación ambigua, especialmente para muestras que tienen niveles bajos de analitos. Con el analizador Vcheck, se produce un resultado más preciso y objetivo, para un mejor diagnóstico.
- Además del resultado positivo / negativo, el valor COI puede ayudar a estimar la cantidad relativa de antígeno.
- (Cuanto más alto sea el valor COI, más antígeno está presente).



#### Productos

Perro	Antígeno Corona Virus Canino <b>Vcheck CCV Ag</b>	➤ Muestra <b>Heces</b>
	Antígeno Virus Distemper Canino <b>Vcheck CDV Ag</b>	➤ Muestra <b>Hisopo conjuntival, orina, suero o plasma</b>
	Antígeno Parvo Virus Canino <b>Vcheck CPV Ag</b>	➤ Muestra <b>Heces</b>
	Antígeno Parvo/Corona Virus Canino <b>Vcheck CPV/CCV Ag</b>	➤ Muestra <b>Heces</b>
	Antígeno de Gusano de Corazón Canino <b>Vcheck CHW Ag</b>	➤ Muestra <b>Sangre entera, suero o plasma</b>
Gato	Antígeno Parvo Virus Felino <b>Vcheck FPV Ag</b>	➤ Muestra <b>Heces</b>

#### Datos de Evaluación

	Vcheck CCV Ag	Vcheck CDV Ag	Vcheck CPV Ag	Vcheck FPV Ag
Sensibilidad	93.1 %	91.8 %	96.4 %	97 %
Especificidad	97.5 %	98.5 %	99.7 %	97.8 %

## Procedimiento de Prueba

### Incubar y leer


- 1 Inserte el dispositivo de prueba en el analizador Vcheck y agregue 4 gotas de la muestra mezclada, gota a gota verticalmente en el orificio del dispositivo
- 2 Después de 10 minutos el dispositivo de prueba leerá automáticamente
- 3 Leer el resultado



Positivo(+), COI  $\geq 1$   
Negativo(-), COI < 1

### Leer inmediatamente

- 1 Agregue 4 gotas de muestra mezclada en el orificio de muestra del dispositivo de prueba, gota a gota verticalmente y espere 10 min.
- 2 Seleccione "Leer Inmediatamente"
- 3 Inserte el dispositivo en el analizador de Vcheck y lea el resultado

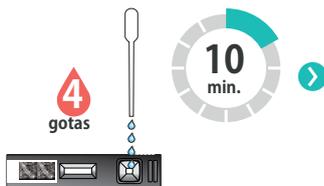

No. Producto	Nombre del Producto	Tipo de Producto	Contenido
VCF110DD	Vcheck CCV Ag	Dispositivo	10 Tests/Kit
VCF111DD	Vcheck CDV Ag	Dispositivo	10 Tests/Kit
VCF112DD	Vcheck CPV Ag	Dispositivo	10 Tests/Kit
VCF114DD	Vcheck CPV/CCV Ag	Dispositivo	10 Tests/Kit
VCF117DD	Vcheck CHW Ag	Dispositivo	10 Tests/Kit
VCF113DD	Vcheck FPV Ag	Dispositivo	10 Tests/Kit