

Información General

Objetivo: Detección del antígeno del virus de la Influenza canina

Principio: Inmunoensayo de cromatografía

Muestra: Fluido nasal

Materiales:

- Dispositivo para prueba rápida Anigen CIV
- Tubo de ensayo para muestra con diluyente buffer
- Hisopo para recolección de la muestra
- Gotero desechable

Características especiales:

- Detección del antígeno de la influenza canina H3
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad
 - Sensibilidad: 90% vs. PCR Tiempo Real
 - Especificidad: 100% vs. PCR Tiempo Real




Procedimiento



1 Recolecte el exudado de las células epiteliales de la cavidad nasal



2 Inserte el hisopo dentro del tubo de la muestra y agite al menos 10 veces

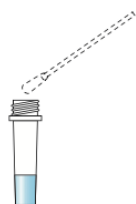

3 Retire el hisopo exprimiéndolo contra las paredes del tubo




4 Tome el sobrenadante con el gotero desechable



5 Agregue 4 gotas en la ventana del dispositivo



Interpretación

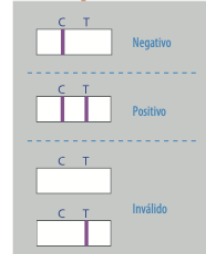

Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RG1107DD	CIV Ag	Dispositivo	10 Pruebas/Kit