

Anigen Rapid CPV/CCV Ag

Información General

Objetivo: Detección del antígeno de Parvovirus y Coronavirus canino

Principio: Ensayo de inmunocromatografía

Muestra: Heces

Materiales:

- Dispositivos para prueba rápida Anigen CPV/CCV Ag
- Tubos con diluyente para la muestra
- Hisopos para recolección de la muestra
- Goteros desechables

Características especiales:

- Detección simultánea de CPV y CCV con tan solo una muestra
- Procedimiento de un solo paso: Rápido y preciso
- Alta sensibilidad y especificidad



Procedimiento

1 Recolecte las heces caninas usando el hisopo

2 Inserte el hisopo con la muestra en el tubo del diluyente y agite el hisopo por lo menos 10 veces

3 Retire el hisopo exprimiéndolo contra las paredes del tubo

4 Tome el sobrenadante con el gotero desechable

5 Agregue 4 gotas en la ventana del dispositivo de la prueba

4 gotas

5~10 min.

Interpretación

C	T	Negativo
C	T	Positivo
C	T	Inválido

Información para ordenar el producto

Cat. No.	Descripción	Tipo	Presentación
RC1105DD	CPV/CCV Ag	Dispositivo dual	10 Pruebas/Kit

